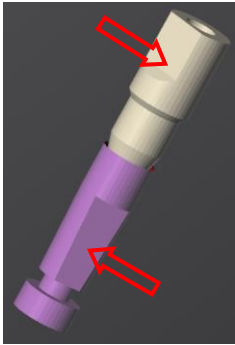
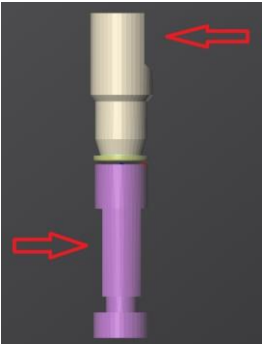
	<b>DİJİTAL KÜTÜPHANE REVİZYON FORMU</b> <i>DIGITAL LIBRARY REVISION FORM</i>	REF NO. <i>REF NO.</i>	KP.12-F.12
		YAYIN TARİHİ <i>EDIT. DATE</i>	24.07.2020
		REV. NO. <i>REV. NO.</i>	000
		REV. TARİHİ <i>REV. DATE</i>	
		SAYFA NO. <i>PAGE NO.</i>	1/1

Değişiklik Yayın Numarası: <i>Changing Request Form No</i>	DKF-02		
Kütüphane Adı: <i>Library Name</i>	Revizyon Numarası : <i>Revision Number</i>	Revizyon Tarihi : <i>Revision Date</i>	
<b>DENTAL WINGS</b>	Rev.01	12.01.2021	
Değişiklik Nedeni <i>Changing Reason</i>	<p>'T6 TiBase Single 3.5 - 4.1 - 4.8' isimli kütüphane dosyasında tarama postu düz yüzeyi ile T6 32204 kodlu dijital analog düz yüzeyi paralellik sağlamıyor.  <i>The flat surface of Scan post and the flat surface of T6 32204 coded digital analog is not parallel in the 'T6 TiBase 3.5-4.1-4.8' named digital library file.</i></p>		
Değişiklik Görseli <i>Changing Image</i>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Hatalı konumlandırma Tarama postu ve dijital analog düz yüzeyi paralel değil. <i>Incorrect positioning. The flat surface of Scan post and the flat surface of Digital analog is not parallel.</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Düzeltilmiş konumlandırma. Tarama postu ve dijital analog düz yüzeyi paralel. <i>Correct positioning. The flat surface of Scan post and the flat surface of Digital analog is parallel.</i></p> </div> </div>		
Yapılan Değişiklik <i>Changing</i>	Kütüphane dosyasındaki hata tespit edildi. Düzeltmeler yapıldı. Sorun çözüldü. <i>Error in the library has been detected. Corrections were made and problem solved.</i>		
Değişikliği Yapan: <i>Notified of changes by</i>	Tolga BIÇAK	Değişikliği Onaylayan: <i>Approved by</i>	Arda YALAMAÇ
Değişiklik Tarihi <i>Changes date</i>	12.01.2021	Değişiklik Bildirim Tarihi <i>Notified of changes date</i>	12.01.2021